

**nanoclean**  
powered by aXonnite®

**N4**

Alkoholowy preparat  
do dezynfekcji powierzchni  
i sprzętów



#### Opis produktu

Płyn o działaniu wirusobójczym, bakterioobójczym i grzybobójczym. Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia i mebli. Do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, przemysłowych i prywatnych, w tym szkołach i placówkach ochrony zdrowia.

Wykonany w unikalnej technologii, preparat do odkażania wszelkich powierzchni wodo- i alkohooloodpornych. Dzięki zawartości cząstek srebra aXonnite® regularne stosowanie N4 trwale zabezpiecza dezynfekowane powierzchnie i zapobiega namnażaniu się wirusów, bakterii i grzybów na tych powierzchniach, również pomiędzy cyklami odkażania.

#### Sposób użycia:

Preparat gotowy do użycia.

Preparat należy nanieść natryskowo na powierzchnię. Dla osiągnięcia efektu działania utrzymać powierzchnię w stanie wilgotnym (patrz tabela poniżej) pozostawiając do wyschnięcia. Nie służywać.

efekt działania*	czas
wirusobójczy	2 minuty
bakterioobójczy	5 minut
grzybobójczy	15 minut

\* - wyniki badań zgodnie z normami europejskimi



#### Obszar zastosowania:

Nadaje się do wszelkich powierzchni wodo- i alkohooloodpornych. Przeznaczony jest do miejsc, gdzie wymagane są wysokie standardy higieny.

#### Skład:

100 g produktu zawiera: 40g etanolu, 30g izopropanolu i 0,4 mg aXonnite Silver®

#### Ostrzeżenia:



#### Środki ostrożności:

Wysokie łatwopalna ciecz i opary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbudzone. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Unikać wdychania mgły / par / rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

**W przypadku dostania się do oczu:** Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 6088/15

Data produkcji i nr serii podana na opakowaniu,

Data ważności 24 m-ce od daty produkcji

#### Opakowanie:

butelka ze spryskiwaczem

kanister

**500ml e**

**5l e**



W przypadku pytań dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu należy skontaktować się i-team Polska

#### Wyłącznie dystrybutor:

i-team Polska Sp. z o.o.  
ul. Tyniecka 126 C, PL 30-376 Kraków  
tel (+48) 12 268 32 18  
hello@i-teampolska.pl www.i-teampolska.pl

#### Producent / Podmiot odpowiedzialny:

Nano-Tech Polska Sp. z o.o. Sp. K.,  
ul. Wenecka 12, PL 03-244 Warszawa  
tel. (+48) 22 789 44 51